



Reduzierte Feilenanzahl

Der Einsatz von HyFlex EDM Feilen ermöglicht besonders in geraden und größeren Kanälen die Reduzierung der Feilenanzahl, je nach klinischer Situation auf 2-3 Stück.

HyFlex EDM Feilen können mit 400 Umdrehungen pro Minute und einem Drehmoment von 2,5 Ncm (25 mNm) verwendet werden. Die Gleitpfadfeilen sollten mit 300 Umdrehungen pro Minute und einem Drehmoment von 1,8 Ncm (18 mNm) eingesetzt werden.

Regeneration durch Thermobehandlung



Endo Highlight Kit	99,00 €*	
1 x HyFlex EDM Shaping Set (10/05, 25/~, 25/12), 1 x ROEKO GuttaFlow bioseal 2.5ml 1 x ROEKO Guttapercha-Spitzen HyFlex EDM OneFile 25	60022033	
HyFlex EDM Introkit	94,90 €*	
HyFlex EDM Introkit Compact (Organizer, ROEKO GP Greater Taper, 25/12 Orifice Opener, 10/05 Glidepath File, 25/~ HyFlex OneFile, 40/04 Finisher File)	60019660	
HyFlex EDM Sets	je 43,60 €*	
HyFlex EDM Shaping Set (25/12 Orifice Opener, 10/05 Glidepath File, 25/~ HyFlex OneFile)	60019363	
HyFlex EDM Finishing Set (40/04 Finisher File, 50/03 Finisher File, 60/02 Finisher File)	60019364	
HyFlex EDM Refills, 3 Feilen / Packung	je 43,60 €*	
HyFlex EDM 25/12 Orifice Opener, 15 mm	60019596	
HyFlex EDM 10/05 Glidepath File, 25 mm	60019594	
HyFlex EDM 25/~ OneFile, 25 mm	60019595	
HyFlex EDM 40/04 Finisher File, 25 mm	60019597	
HyFlex EDM 50/03 Finisher File, 25 mm	60019598	
HyFlex EDM 60/02 Finisher File, 25 mm	60019599	
HyFlex Zubehör		
Endo Procedure Block, 1 Stk.	72,90 €*	60011083
Endo Organizer, 1 Stk.	15,80 €*	60018783
Endo Practice Block Packung, 3 Acryl Blöcke	15,60 €*	60011085
Passende ROEKO Guttapercha-Spitzen	je 20,90 €*	
Guttapercha-Spitzen HyFlex EDM OneFile 25/~, 60 Stk.	60019568	
Guttapercha-Spitzen Greater Taper 40/04, 60 Stk.	361740	
Guttapercha-Spitzen Greater Taper 50/03, 60 Stk.	60019567	
Guttapercha-Spitzen Top color ISO 60, 100 Stk.	365160	

* Alle Preise sind unverbindliche Preisangaben. Es gelten die aktuellen Preise der Depots.
Preise zzgl. MwSt. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Das Endo Highlight Kit erleichtert den Einstieg in die Endodontie

Neues Anwendervideo zur sicheren und effizienten Wurzelkanalaufbereitung mit HyFlex™ EDM NiTi-Feilen:

